



---

## INSTRUÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE FETAL

---

- ✓ Deverá ser colhido após a 18ª semana gestacional.
- ✓ Colher 2ml em seringa descartável (marca BD), lavada com heparina (0,1 mL de Liquemine Roche). Vedar a entrada de ar.
- ✓ Armazenar em geladeira. Utilizar gelo e caixa de isopor para enviar a amostra ao laboratório.
- ✓ A amostra deverá ser enviada ao laboratório nas primeiras 24 horas e num prazo máximo de 48h após a coleta.
- ✓ Prazo para entrega do resultado (a partir do recebimento do material no laboratório):
  - 10 dias.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o laboratório: (011) 2244-9100 ou (011) 8291-4035